

## 両面テープの使い方



1、貼り付ける場所の皮膚を石けんでよく洗って、乾かして下さい。

2、保湿成分の入っている石けんでは接着力が弱くなりますので、薬用石けんをお勧めします。  
(スキントックワイブでフォームの裏側を拭いて下さい。)

3、両面テープの剥離紙を裏の半分だけをはがし、フォームの角、3カ所に貼り付けた後もう半分をはがして、フォームにしっかりと貼り付けて下さい。

\*フォーム中心部に両面テープを貼ると、動いたときにテープがはがれる原因となります。




4、フォームに縁から1~2mmくらいはみ出るように貼ると、装着後しわが寄りにくくなります。



5、皮膚の貼る部分をスキントックワイブで拭いて下さい。




6、フォームに貼った両面テープの剥離紙を片方だけをはがして下さい。

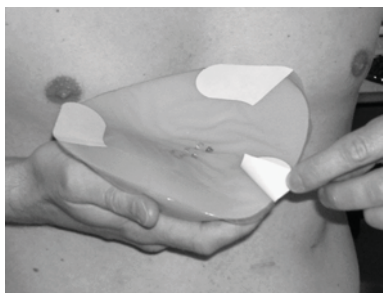

7、上部のテープの剥離しだけ、全てはがして下さい。




8、フォームの上部をつまんで、装着位置を決定します。つまんで持つことで、フォームが自身の重さで自然に下の部分の装着位置が決まります。

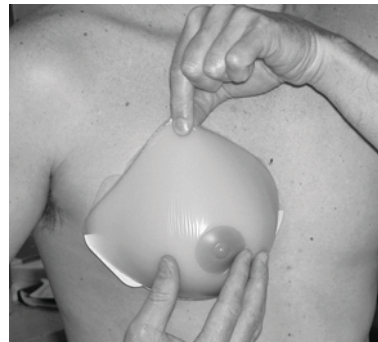

9、しっかりと、胸に押さえつけて、接着して下さい。



10、フォームの下部のテープの残った剥離紙半分をはがして下さい。

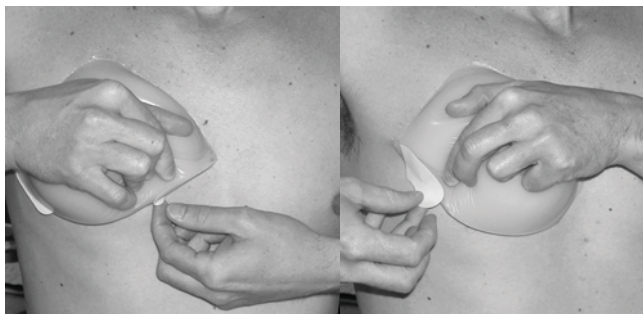

11、2分間、フォームの回りを両手で包むようにしっかりと押さえつけて接着して下さい。

