



ブレストフォームの扱い方

ブレストフォームを包んでいる、フィルムは絶対にはがさないで下さい。

使用后、ブレストフォームを肌からはがすときは、ゆっくり下部から手のひらを差し込むようにしてはがして下さい。
無理に引っ張ったり、爪を立てると破損する場合があります。

万が一、フィルムが破けた場合は、ボディシェープテープを破れた部分に貼ってシリコンが漏れるのを防いで下さい。

使用後は、ぬるま湯で洗い、タオルで優しく水分を拭き取り、陰干しをして下さい。

テープや接着剤がフォームや肌に残った場合は[タックアウェイ](#)をご使用なれば、きれいになります。

正しい取り扱い、お手入れをして頂ければ数年の使用が出来ます。

