

ご使用方法とご注意点

フローラ SAKURA をより永く快適にお使いいただくために、ご使用方法とご注意点をご案内させていただきます

ご使用前に準備するもの

フローラ SAKURA、プロテクトコート、スームスルック、パレット、ヘラ、ベビーパウダー、ティッシュペーパー、無水エタノール

〈 SAKURA 装着方法 〉

- ① SAKURA 装着前に装着部分を洗浄又は清拭し清潔にします。
- ② SAKURA 本体と皮膚との境目にあたる部分（約2～3cm程度）に薄くプロテクトコートを塗ります。
- ③ SAKURA と皮膚の境目を埋めるためのスームスルックを用意します。
- ④ スームスルックをパレットの上に容器から適量出します。範囲が広い場合には、2～3回に分けて出してください。
- ⑤ スームスルックをヘラで良く混ぜ合わせます。（スームスルックは室温により凝固時間が短くなる場合がありますので、暖房機などの近くでは行わないでください。）
- ⑥ SAKURA を装着する部位を確認し、フローラ SAKURA の裏面がぴったりと貼りつくように装着します。
- ⑦ 装着位置にズレがないかよく確認して下さい。
- ⑧ スームスルックを指先に少量取り SAKURA と皮膚の境目に塗ります。この時にあまり指先に強い力を入れないようにご注意ください。範囲が広い場合には、2～3回に分けて行って下さい。
- ⑨ スームスルックを塗った表面に凹凸が目立つ場合は、指先に少量の無水エタノールを取り凹凸のある表面を軽く撫でて整えて下さい。
- ⑩ スームスルックは約8分程度で凝固します。凝固するまで触れずにお待ちください。
- ⑪ スームスルックがほぼ凝固しましたら、ベビーパウダーを軽く塗ってテカリを抑えてください。

〈 SAKURA を外す 〉

- ① 皮膚に接着している外側部分のスームスルックから、静かに剥がしてください。
- ② SAKURA 全体を外します。
- ③ SAKURA 本体に残ったスームスルックは、SAKURA の中央から外側に向かって軽くこするとスームスルックだけが剥がれてきますので、剥がし取ってください。
- ④ SAKURA の裏側を軽く水洗いで洗浄してください。又は SAKURA の裏面に消毒用エタノールを振りかけて洗浄してください。
- ⑤ 備え付けのシートに裏面を下にして貼り付けてください。
- ⑥ 備え付けの保管箱に保管してください。
- ⑦ 外した後の装着部位は洗浄し、皮膚用保湿剤等でお手入れしてください。

〈 快適にお使いいただくために 〉

*夏季などの汗をかきやすい季節には、時折フローラ SAKURA を外し汗を拭き取ってから再度装着してください。

● SAKURA 取り扱い注意事項

- ・ SAKURA は柔らかな素材で作製しておりますので先端のとがったもの、刃物など鋭利なもので突いたりしないでください。
- ・ 備え付けのシートから外す時にはゆっくりと静かに剥がしてください。強く引っ張り過ぎると破損する場合があります。
- ・ SAKURA 表面を強く擦らないようにご注意ください。全体に大変柔らかな素材で出来ていますので強く擦ることで破ける又は色が落ちる場合があります。
- ・ 洗浄する際に、無理な力を加えないでください。SAKURA 辺縁が伸びてしまったり、切れてしまう可能性があります。
- ・ SAKURA の素材であるシリコーンは高温には耐久性がありますが、燃焼しますので火炎には近づけないでください。
- ・ SAKURA の素材であるシリコーンは、高濃度の硫黄に反応して変色する場合がありますので、高濃度の硫黄に長時間接触することは避けてください。
- ・ 直射日光や紫外線に長時間さらされることにより、シリコーンの劣化が促進する場合がありますので、ご注意ください。
- ・ SAKURA にゴム製品・ラテックス製品を接触しないようにご注意ください。シリコーンの劣化の原因になります。
- ・ 保管は保管箱に入れて、直射日光の当たらない場所に保管してください。